

O kit de auto-coleta do Laboratório GENE contém: 2 tubos, 2 escovas, 2 etiquetas de identificação e 1 ficha de autorização.

AUTO-COLETA DOMICILIAR DE CÉLULAS BUCAIS

Escrever o nome nas duas etiquetas. Deixar prontas para usar no final da coleta.

Encher os dois tubos com álcool líquido comum, acima do meio. Não usar álcool gel.

Usar uma escova para esfregar cada lado da bochecha.

Esfregar firmemente a parte interna da bochecha, para baixo e para cima, 10 vezes, girando o cabo da escova.



ESFREGAR,
GIRANDO O
CABO DA ESCOVA


Mergulhar e girar a escova no álcool do primeiro tubo para soltar as células, até o álcool ficar turvo.

Descartar a primeira escova utilizada e fechar bem o tubo para não vaziar.


Identificar o tubo usando a etiqueta com o nome da pessoa.

Repetir o procedimento de coleta, com a segunda escova, do outro lado da bochecha, usando o segundo tubo e a segunda etiqueta.

Enviar para o
Laboratório GENE
Av. Afonso Pena, 3111
9º andar 30130 909
Belo Horizonte MG
Fone (31) 3284 8000

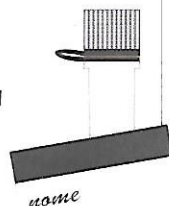

nome

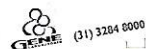

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE CÉLULAS BUCAIS

Fazer as coletas separadas, uma pessoa de cada vez, para não misturar as amostras. Usar as escovas e os tubos sinalizados com as mesmas cores, para cada uma das pessoas a serem periciadas. Encher 2/3 de cada tubo com álcool. Escrever o nome do periciado nos adesivos que se encontram ao lado. Usar a primeira escova para o lado direito. Esfregar parte interna da bochecha, 10 vezes para baixo e para cima, em rotação. Agitar a escova dentro de um tubo com álcool para soltar as células da boca, presas nas fibras, até que o álcool fique opaco. Fechar bem o tubo para não vaziar e lacrar com a etiqueta de identificação já preenchida. Descartar a primeira escova. Repetir o procedimento com a segunda escova, no lado esquerdo da bochecha.

NOME COMPLETO DE UM PERICIADO

NOME COMPLETO DE UM PERICIADO